


carefix[®]
Creating functional comfort

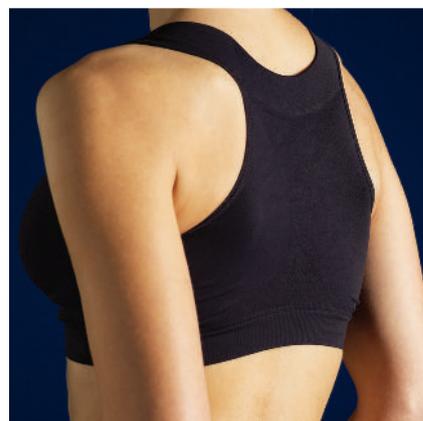

MARIANNE
Sutiã Pós-Operatório
Com alças de fixação para drenos




TYTEX[®]

O modelo MARIANNE foi concebido para o período que se segue à intervenção cirúrgica, quando a pele se encontra mais flácida e sensível, sendo recomendado a aplicação de suporte e compressão.


O sutiã pós-operatório MARIANNE é adequado a qualquer cirurgia ao peito uma vez que proporciona suporte e compressão ao local da intervenção cirúrgica. O sutiã ajuda no processo de cicatrização, na protecção do local da intervenção cirúrgica e reduz o risco de edema e complicações pós-cirúrgicas. Com um design específico de zonas de suporte e compressão embutidos, o sutiã pós-operatório MARIANNE oferece um óptimo equilíbrio entre compressão e conforto.

Características do sutiã pós-operatório:

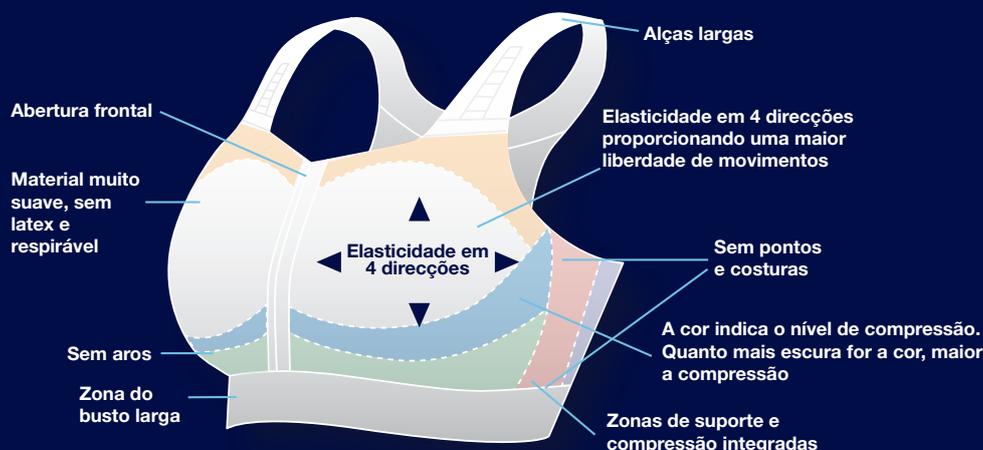


Outras características exclusivas do sutiã MARIANNE:

- Presilhas para bolsas de drenagem (removíveis caso não sejam utilizadas)
- Bolsas bilaterais para suportar formas leves
- Copas com duas camadas para um suporte mais firme
- Fecho cómodo à frente com colchete para facilitar a aplicação e observação do local cirúrgico
- Alças ajustáveis à frente
- Pode ser totalmente aberto para aplicação fácil por parte do doente e/ou profissionais de saúde
- Alças largas nos ombros para proporcionar um suporte melhor

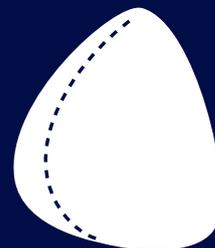

Disponível com ou sem próteses de espuma

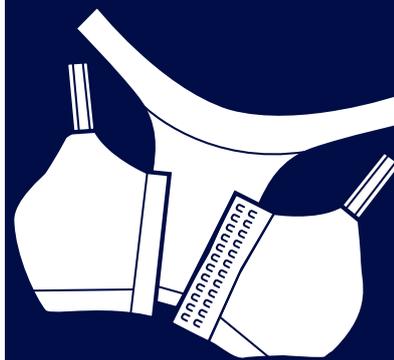

Disponível nas cores branco e preto.

Composição:

S - 2XL: 91% Poliamida 9% Elastano
3XL - 4 XL: 94% Poliamida 6% Elastano

Instruções de lavagem:



Utilizar um saco de lavagem. Fechar os fechos. Antes da lavagem, remover a espuma de enchimento das próteses e as alças dos drenos do sutiã.

Indicações:

Para uso pós-cirúrgico em todos os tipos de cirurgias, especialmente mastectomias e lumpectomias.

Precauções:

O sutiã deve ser removido durante os tratamentos de radiação uma vez que possui partes metálicas. Em caso de desconforto ou questões relacionadas com a sua utilização por favor consultar o seu médico ou enfermeiro. Peso máximo para a alça de drenos: 500ml.

Tamanhos recomendados

Tamanho da faixa	EU	70 cm	75 cm	80 cm	85 cm	90 cm	95 cm	100 cm	105 cm	110 cm	115 cm	120 cm	125 cm	130 cm	135 cm	
F/B/E	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150		
US/UK	28 inch	30 inch	32 inch	34 inch	36 inch	38 inch	40 inch	42 inch	44 inch	46 inch	48 inch	50 inch	52 inch	54 inch		
Copa	A															
	B															
	C															
	D															
	DD/E															
	F															
	G/H															
	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL									

Para mais informações por favor contactar:



Avenida Casal Ribeiro, 44B, 1000-093 Lisboa

Tel. 218 516 368

geral@inodia.pt | www.inodia.pt

https://www.facebook.com/inodia.pt/